

Tuloksen tulkitseminen



**Positiivinen
tulos**

**Negatiivinen
tulos**

**Epäluotettava
tulos**

Lisätietoja testituloksesta alla olevassa värillisessä laatikossa.

**15 minuutin kuluttua tulosta ei voi enää tulkita luotettavasti.
Hävitä tästä syystä testikasetti tulkittuasi tuloksen oikean ajan kuluessa.**

Testi on **positiivinen**, mikäli 10 minuutin reaktioajan aikana **testikasetin molemmille tulosalueille "C" ja "T" ilmestyy kaksi violettiä viivaa**, vaikka "T"-alueen viiva olisikin hyvin heikko. Tämä tarkoittaa H. pylori -infektiota. Keskustele lääkärisi kanssa mahdollisesta tarkemmasta tutkimuksesta.

Testi on **negatiivinen**, mikäli **vain yksi violetti viiva ilmestyy testikasetin "C"-tulosalueelle**. Tämä tarkoittaa, että H. pylori -infektiota ei havaittu.

Testi on **epäluotettava**, mikäli 10 minuutin kuluttua **yhtään violettiä viivaa ei ilmesty, tai mikäli "T"-alueella on viiva mutta "C"-alueella ei**. Mahdollisia syitä epäluotettavaan testitulokseen ovat vahingoittunut foliopakkaus, vääränlainen säilytys tai virhe testiä suoritettaessa. Säilytä kaikki testin osat ja ota yhteyttä testin valmistajaan.

Minulla on H. pylori -infektio. Mitä minun tulisi tehdä?

Varaa aika lääkärillesi, joka järjestää tarvittavat tutkimukset joilla diagnoosi voidaan varmistaa. Antibioottihoidon avulla lääkärisi pystyy useimmissa tapauksissa täydellisesti hävittämään bakteerin ja siten välttämään infektiin liittyvät suolisto-oireet. Näiden ohjeiden ottaminen mukaan vastaanotolle lääkärille esitettäväksi voi olla hyödyllistä, sillä näin lääkärisi tietää millaisesta testistä on ollut kysymys.

Minulla on vatsakipuja, mutta H. pylori -infektioita ei havaittu. Mitä minun tulisi tehdä?

Keskustele lääkärisi kanssa tarkemmasta tutkimuksesta.



Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Älä käytä testiä sen vanhentunutta.
Säilytä 4-30 °C (39-86 °F) lämpötilassa.
Käytä testiä ja lansettineulaa vain kerran.
Älä käytä vahingoittunutta lansettia.
Älä pure testilevyä.
Vain ulkoiseen käyttöön.
In-vitro-diagnostinen testi itsetestaukseen.

Sisältö: Käyttöohjeet, folio jossa testikasetti ja kosteudenpoistotynny, puskuripullo, lansetti ja laastari

Lansetti
■ VITREX Medical A/S
Vasekaer 6-8, 2730 Herlev, Denmark



Vatsahaavatesti



Yleistä tietoa:

Helikobakteeri, *Helicobacter pylori* ("H.pylori") aiheuttaa sairauksia kuten vatsatauti ja vatsahaavoja. Toistaiseksi ei ole olemassa rokotetta tätä sekä lapsilla että aikuisilla tavattavaa infektiota vastaan. Asianmukaisen lääkityksen (kuten antibioottien) käyttö voi kuitenkin hävittää bakteerin elimistöstä.

Limapinta suojaa sekä vatsan pintaa että pohjukaissuolta vatsahapoilta. Jos tämä suojaava toiminto häiriintyy jollain tavoin, vatsan limaa erittävä pinta voi vahingoittua, mistä voi seurata haavaumia. Tyypillisesti näin tapahtuu H. pylori-infektion seurauksena, mikä myös lisää vatsasyövän riskiä.

Arvioiden mukaan tällä hetkellä noin puolella maailman väestöstä on *Helicobacter pylori*-infektio, vaikka kaikki infektiot eivät aiheutakaan oireita. Toisaalta myös infektion laajuus, henkilön yleinen terveydentila ja ruokavalio vaikuttavat sairauden kehittymiseen.

Tätä diagnostista testiä käyttämällä H. pylori -infektio voidaan havaita helposti ja luotettavasti. Tarvitset vain pisanan verta, ja tuloksen saat muutamassa minuutissa.

Useimmissa tapauksissa H. pylori -infektiota voidaan erittäin tehokkaasti hoitaa antibioottien ja vatsan liikkautumista neutraloivien lääkkeiden eli antasidien yhdistelmällä. Kun bakteeri on saatu hävitettyä elimistöstä, on vatsatautien yleensä hoidettu.

HUOMIOITAVAA:

Jos sinulla on aiemmin ollut H. pylori -infektio jota on hoidettu antibiooteilla, tämä testi saattaa antaa positiivisen tuloksen vielä yli vuoden kuluttua sairauden hoitamisesta, vaikka infektiota ei enää elimistössä olisikaan.

HUOMIOITAVAA:

**Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen tärkeiden terveytesi vaikuttavien päätösten tekemistä.
Testi voidaan käytön jälkeen hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.**

Tuotetiedot:

H. pylori -infektion puuttuminen ei tarkoita sitä, ettet voisi saada vatsahaavaa jostain muusta syystä. Vaikka testi on erittäin tarkka, myös väärä tulos on harvinaisessa tapauksessa mahdollinen. Tämä on immunologinen testi, joka tunnistaa H. pylori -vasta-aineita verestä. Testin eläinperäiset osat (kuten vasta-aineet) ovat mahdollisesti infektiivisiä, mutta niistä ei ole haittaa terveydelle kun kaikkia testin osia käytetään ohjeiden mukaisesti. Puskuriliuos sisältää harvittomia määriä natriumsidia.


Kliinisessä vertailussa, johon osallistui 304 henkilöä, 132 henkilöltä löytyi H.Pylori-infektio. Näistä 118 henkilöä saivat myös positiivisen tuloksen Care diagnostican Vatsahaavatestistä, jossa testataan samaa infektiota.

Valmistelu


Älä avaa suljettua foliopakkausta ennen kuin olet valmis aloittamaan testin. Tarvitset puhtaan paperipyyhkeen ja kellon, jossa on sekuntinäyttö. Repäise foliopakkaus auki, ota testikasetti pakkauksesta ja sijoita se tasaiselle pinnalle. Hävitä testin mukana tuleva testiä kosteudelta suojaava vedenpoistoaine avaamattomana tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lansettineulan käyttäminen


Älä käytä lansettia mikäli se on vioittunut tai siitä puuttuu osia. Pese kätesi huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä (lisätäksesi veren virtausta sormeesi) ja kuivaa huolellisesti.

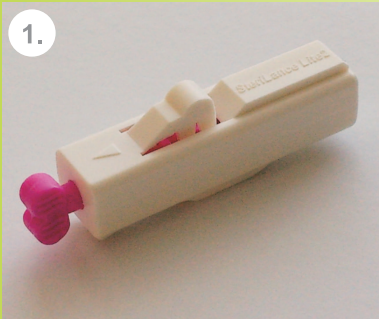


Lansetissa on suojakotelo, joka sisältää pistoslaitteen. Lansetin yläpinnalla oleva liipasin, joka näyttää vivulta, vapauttaa neulan. Lansettineulan päässä on suojakorkki.

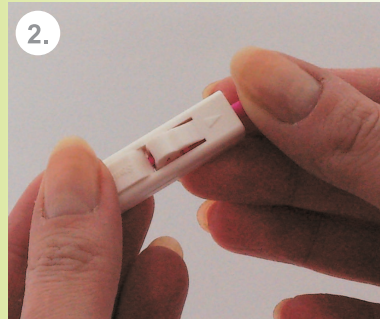

Irrota suojakorkki kiertämällä sitä täysi kierros. Älä paina vipua kiertämisen aikana, muuten neula vapautuu.

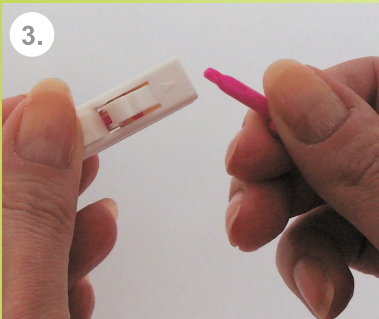

Vedä suojakorkki irti. Lansetti on nyt käyttövalmis.

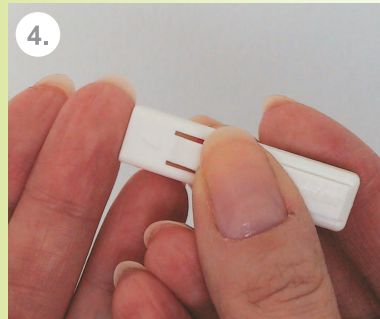


Paina lansettineulan aukko keskisormesi pään sisäpuolelle ja paina vipua kunnes kuulet napsahduksen.

Näytteen testaaminen

Kymmenessä minuutissa tiedät, onko sinulla Helikobakteeri-infektio.



Anna kätesi roikkua vapaasti pistetty sormi alaspäin ja odota, kunnes sormenpäähän on muodostunut iso pisara verta. Sormen puristaminen molemmilta puolilta kuvan osoittamalla tavalla voi olla tarpeen pisaran muodostumiseksi.

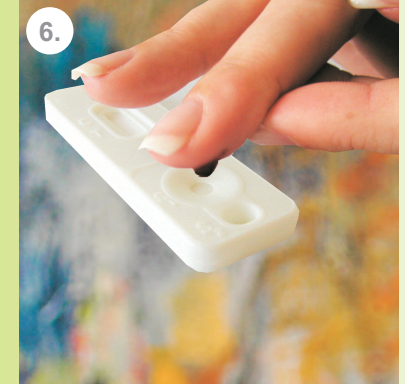

Tuo pistetty sormesi lähelle testikasettia kuvan osoittamalla tavalla ja anna yhden veripisaran tipahtaa testialueelle "S1". Varmista, että sormenpääsi ei kosketa testialuetta.

Odota 30 sekuntia.



Avaa puskuripullon korkki ja purista **hitaasti** ja tarkasti 9 pisaraa testi-alueeseen "S2", jotta liuos ei vuoda yli.



Odota 10 minuuttia

Tulos saattaa olla epäluotettava, jos odotat huomattavasti pidemmän tai lyhyemmän ajan.

Tulosten arviointi seuraavalla sivulla.