



Stop-Hemo, Blodstillande vadd

Det naturliga valet för behandling av näsblod och ytliga sår

Vad är Stop-Hemo, Blodstillande vadd och när skall den användas ?

Stop-Hemo, Blodstillande vadd är en naturprodukt ur havets flora framställd av fibrer innehållande det verksamma ämnet kalciumalginat, som utvinns ur havstång (laminaria hyperborea).

Stop-Hemo, Blodstillande vadd stoppar blödningar genom att påskynda att blodet stelnar (koagulerar).

Stop-Hemo, Blodstillande vadd rekommenderas vid näsblod, raksår, ytliga skär-, stick- och skrubbsår.

Stop-Hemo, Blodstillande vadd suger upp sårvätska och bildar en gel som ger såret ett yttre skydd och gör den lämplig även för vård av ytliga vätskande brännsår.

Hur används

Stop-Hemo, Blodstillande vadd ?

Näsblod:

För in vadden i näsborren. Blödningen stoppar efter några minuter men låt vadden sitta kvar i ca 30 minuter för att underlätta att blodet stelnar (den naturliga koagulationsprocessen).



Ytliga sår:(skärsår, raksår ,sticksår, skrubbsår)

Applicera, med ett lätt tryck, Stop-Hemo, Blodstillande vadd på det i förväg rengjorda såret. Låt vadden ligga på ca 30 minuter eller längre för att underlätta att blodet stelnar (den naturliga koagulationsprocessen).



Ytliga vätskande brännsår:

Applicera, med ett lätt tryck, Stop-Hemo, Blodstillande vadd på det vätskande brännsåret. Låt vadden ligga på ca 30 minuter eller längre för att underlätta den naturliga läkningsprocessen.



Var god vänd



Allmänt

När blödningsen upphört, ta bort vadden försiktigt. Ta inte bort de fibrer av vadden som kan ha fastnat i såret. De suggs upp (resorberas) av kroppen och försvinner samtidigt med sårskorpan.

Vilka biverkningar har Stop-Hemo, Blodstillande vadd?

Inga biverkningar finns inrapporterade.

Observera

Stop-Hemo, Blodstillande vadd skall ej användas efter utgångsdatum. Engångsbruk – återanvändning kan öka risken för kontamination och bristande effekt.

Förekomsten av spår av bensalkoniumklorid kan ge upphov till allergiska reaktioner hos vissa överkänsliga personer.

Uppmärksamma vid användning



Sterilointimetelma:
säteilytus



Säilytä alle
30°C
lämpötilassa



HUOM.
Lue
käyttöohjeet.



0459



Utgångsdatum



Batch
nummer



Steriliseringmetod:
bestrålning



Använd ej bruten
eller skadad
förpackning



Återanvänd
ej



Får ej
omsteriliseras



Skyddas mot solljus
och förvaras torrt



Förvaras
under 30°



OBS. Se
användningsråd

Varudeklaration

INNEHÅLL

Steril vadd av naturliga fibrer: 100% kalciumalginat utvunnet ur havstång (laminaria hyperborea)

FÖRPACKNING

Steril vadd i individuella förpackningar; 5 st i varje konsumentförpackning.

EGENSKAPER

Blodstillande. Den blodstillande effekten sker genom en snabb och koncentrerad frigörelse av kalciumjoner då vadden kommer i kontakt med blodet. Vidare bildar fibrerna en stabil nätlignande struktur som möjliggör och underlättar att blodet stelnar (koagulerar).

Absorberande. Kalciumalginatets mikrofibrer bildar, i kontakt med ett vätskande sår, en gel och ett nät av fibrer, som ger såret ett yttre barriär samt ett skydd som isolerar mot temperaturväxlingar.

Sårläkning. Den gel som bildas då kalciumalginatets mikrofibrer kommer i kontakt med såret skapar en god miljö, som underlättar den naturliga sårläkningen.

TILLVERKARENS NAMN OCH ADRESS



Les Laboratoires Brothier

Huvudkontor: 41 Rue de Neuilly – 92735 Nanterre Cedex – France

info@brothier.com - www.brothier.com

Produktion: 49590 Fontevraud l'Abbaye – France

Marknadsförs av

Furukullen AB, Box 24073, S-104 50 Stockholm.