

Här kan du
läsa sagan om
Vår SuppHjälte



copyright awendi ab

SuppHero

SuppHeron är ett hjälpmedel för att föra in supposito-
rium på ett enkelt och säkert sätt och dess avsedda
användning är enbart för detta syfte.

Liten topp

Stor topp

För mer information om och ev. uppdaterad bruksanvisning
av SuppHero besök
www.awendi.se/produkt/bruksanvisning

Kontaktinfo
Awendi AB
Arrendegången 12
619 33 Trosa
info@awendi.se
www.awendi.se



EAN-13

artikelnr är: 7350093490015

SuppHero



Ett hjälpmedel för att föra
in suppositorium på ett
enkelt och säkert sätt.

BPA-fri!

Stor topp

Liten topp



Framtagen och
tillverkad i Sverige.

Bruksanvisning SuppHero

SuppHeron är ett hjälpmedel för att föra in suppositorium på ett enkelt och säkert sätt och dess avsedda användning är enbart för detta syfte.

Anvisningar montering:

Montera SuppHeron enligt följande steg:

1. För in pinnen i blåsan och se till att den fästs ordentligt som bild 1 visar.

Bild 1.



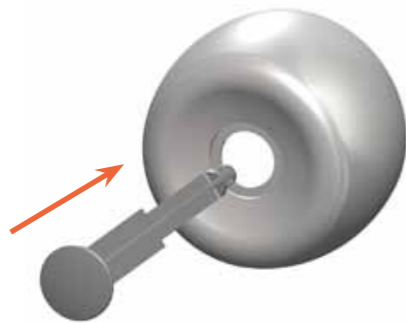


Bild 2.

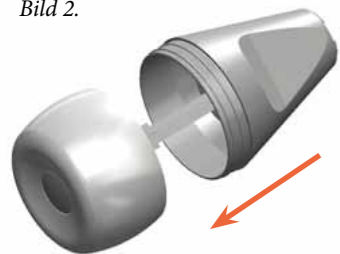


2. Fäst sedan den redan monterade delen i mittendelen som bild 2 visar.

Bild 3.

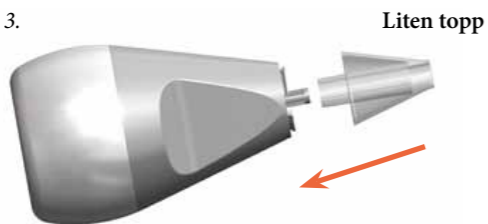

3. Välj sedan vilken storlek på toppen du ska använda och fäst denna med ett klick på den redan monterade delen som bild 3 visar. Den mindre toppen används till mindre suppositorium och den större toppen används till större suppositorium.

Bild 4.

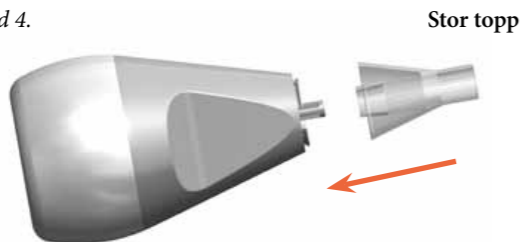

Vilken storlek du ska använda på suppositorium är beroende på vad barnet ifråga väger. Den informationen finner du i bruksanvisningen som det aktuella läkemedelsföretaget föreskriver.

När produkten är färdigmonterad och klar att användas ser den antingen ut som bild 5 eller som bild 6 visar, beroende på toppstorlek.

Liten topp




Bild 5.

Stor topp



Bild 6.

Bild 7.

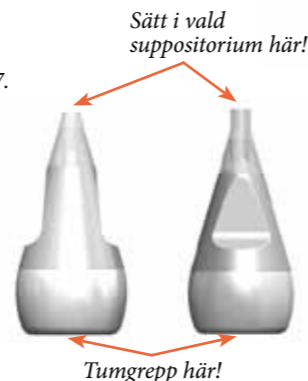

Anvisningar användning:

1. Sätt i vald suppositorium baserat på läkemedelsproducentens anvisningar i hålet i toppen på produkten när du har produkten stående som bild 7 visar.

2. Lägg barnet på rygg, håll med en hand i benen som du för upp mot magen. I den andra handen håller du Supp-Heron. Tummen har du mot pinnens runda del i botten av SuppHeron. Pek- och långfinger har du i de

utformade trekanterna i mitten av produkten. Tryck fram suppositorium så den sticker ut lite och lägg emot dess topp mot analöppningen. Med tummen trycker du sedan försiktigt in suppositorium till dess stopp, släpper taget med tummen och tar bort SuppHeron.

Efter användning:

1. Efter användning plockar du isär produkten och rengör delarna med tvål eller diskmedel och ljummet vatten.
2. Låt lufttorka eller torka med handduk.
3. Montera ihop produkten enligt anvisningarna.

Mellan användningarna, förvaring:

Produkten förvaras oåtkomlig för barn. Produkten förvaras i rumstemperatur och ej i direkt solljus.

Varning

Produkten förvaras oåtkomlig för barn. Produkten används enligt anvisning och avsett bruk. Endast för utvärtes bruk.

Sagan om Vår SuppHjälte



- Hej! Det är jag som är SuppHjälten.



- När du är sjuk eller har ont kan jag hjälpa dig, så du snart mår bättre igen.



- Säg till en vuxen om du vill att jag ska hjälpa till att ge dig medicin så kommer jag på direkten!



- Jag är Din Hjälte när Du vill må bättre.

